


RENIAS FACE GUARD®

高性能透明フェイスガード

透明樹脂の先駆者が届ける

真透明な『いつもの光と安心を』

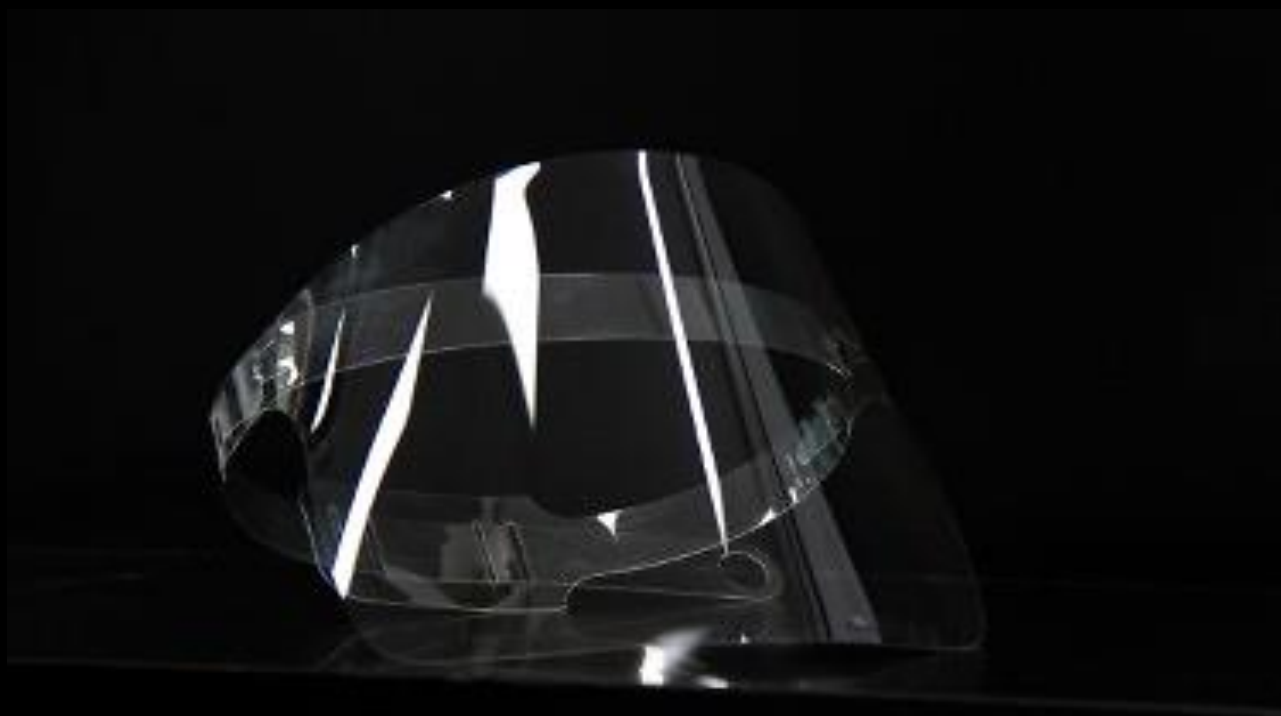

- 商品概要 -

- ・全ての部材を90%以上の光を透過する透明なデザインを採用
- ・ポリカーボネート製シールドで飛散物を遮断
- ・超高性能コーティングを両面施工
ガラス並みの傷防止機能・紫外線99.9%カット・撥水機能を全て付与
- ・メガネや帽子をしても装着可能なデザイン
- ・曇りにくい構造の採用
- ・消毒洗浄で繰り返し使用可能（高い耐薬品性能）

製造元 株式会社レニアス

広島県三原市沼田西町小原200-76


連絡先 0848-86-1137

RFG@renias.com

RENIAS FACE GUARD® PERFORMANCE

レニアスフェイスガード性能


圧倒的な耐傷付き性能でいつでもクリアな視界

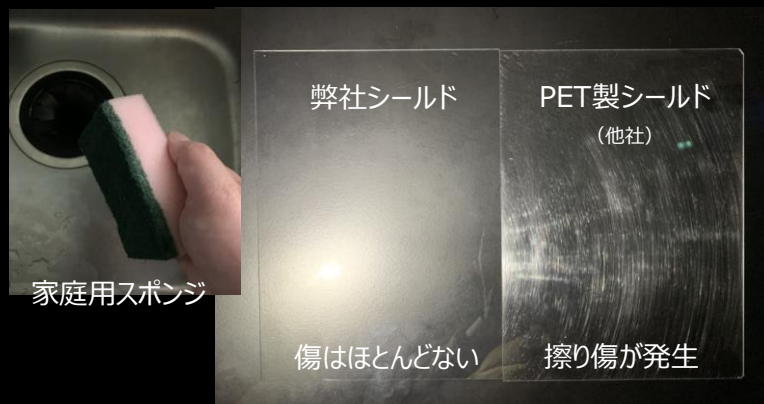

スポンジで10回洗浄後の傷の状態

シールド表面にはガラス並みの傷付き性能があるハードコートを両面施工しており、家庭用スポンジで洗浄する程度では、傷はほとんど入りません。またこのハードコートは高い撥水性能を有しており、洗剤などで簡単に汚れを落とすことができます。

耐熱性が高く、高温となる業種でも使用可能

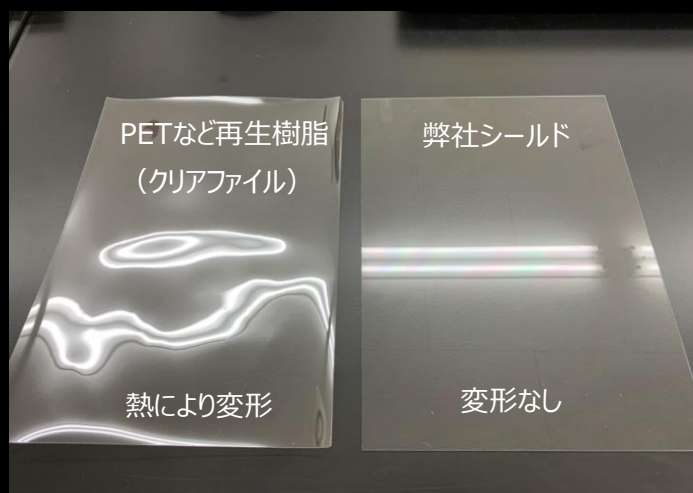

60℃のオーブンへ30分投入後の状態

弊社シールドは自動車用部品の技術を応用しており、高い耐熱性を有しています。高温となる保温機やオーブンなどの近くで作業される方でもご使用いただけます。

(100℃を超える熱にはご注意ください)

製造元 株式会社レニアス

広島県三原市沼田西町小原200-76


連絡先 0848-86-1137

RFG@renias.com

RENIAS FACE GUARD[®]

フェイスガード組立て方法

フェイスガードの開封状態
(両面に傷保護用のフィルムがついています)

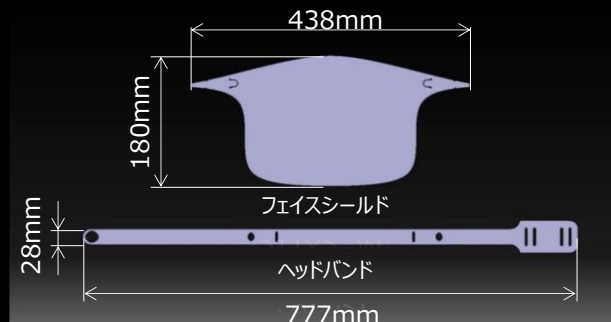


① ヘッドバンド組立て-1




ヘッドバンドのフィルムをはがし、両端を持ち輪をつくります

② ヘッドバンド組立て-2

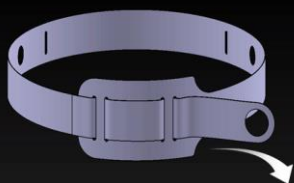


固定部の端の穴に外側から内側へ順番にバンドを差込み図のように組み立てます

③ フェイスシールドとヘッドバンドの固定-1

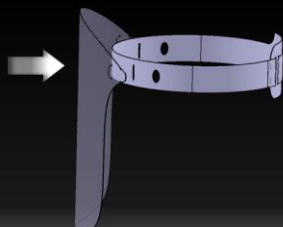


フェイスシールドの両面についているフィルムをはがし図のようにシールドの両端をヘッドバンドへ固定していきます

④ フェイスシールドとヘッドバンドの固定-2

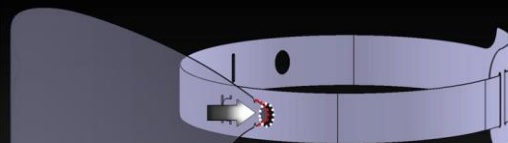


フェイスシールドの端をヘッドバンド側の丸い穴へ、シールド側の切り込みがある部分まで差し込みます

⑤ フェイスシールドとヘッドバンドの固定-3

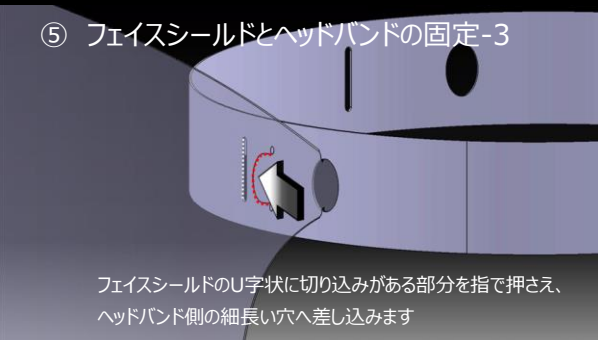

フェイスシールドのU字状に切り込みがある部分を指で押さえ、ヘッドバンド側の細長い穴へ差し込みます

⑥ フェイスガードの完成

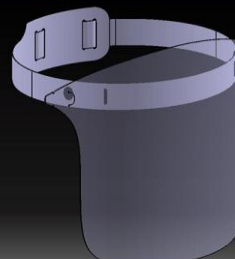

反対側も④と同様の組付けを行えばフェイスガードの完成です

製造元 株式会社レニアス

広島県三原市沼田西町小原200-76

連絡先 0848-86-1137

RFG@renias.com